

Seeger 



SCHULTER-ARM-BANDAGE
GESCHLOSSENE FORM

Schulter-Arm-Bandage geschlossene Form

REF 121 500 S

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank für das Vertrauen in dieses Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

Zweckbestimmung

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine Schultergelenkbandage zur Immobilisierung des Schultergelenkes in definierter Position.

Indikationen

präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Rotatorenmanschettenverletzung, Scapulafraktur

Kontraindikationen


periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperform des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt, Latexallergie

Anwendungsrisiken/Wichtige Hinweise


Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Die Auswahl der geeigneten Größe und eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.

- Medizinprodukt vor radiologischen Untersuchungen ablegen
- Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermeiden.
- bei Taubheitsgefühl Medizinprodukt lockern oder ggf. abnehmen
- bei anhaltenden Beschwerden den Arzt oder Fachhandel aufsuchen
- Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen
- gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
- keine Änderungen am Produkt vornehmen
- nicht auf offenen Wunden tragen
- nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien
- kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung von nur einem Patienten bestimmt
- während der Tragedauer der Bandage: keine lokale Anwendung von Cremes oder Salben im Bereich des angelegten Hilfsmittels – kann Material zerstören


Anziehenleitung

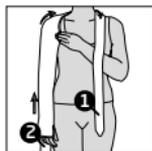

Streifen Sie das Schlauchgestrick über den betroffenen Unterarm bis der Daumen und die Finger an der für Sie vorgesehene Öffnung im Handbereich zu sehen ist, beziehungsweise zu sehen sind. Im Schulterbereich sollte das Schlauchgestrick soweit als möglich im Achselbereich sitzen und das Schultergelenk sollte vom Strumpf bedeckt sein.

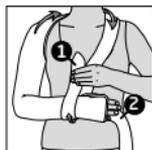

Legen Sie nun den Gurt 1 mit dem Ursprung am Schulterbereich über den Nacken zur gegenüberliegenden Schulter und führen ihn bauchseitig um das Handgelenk herum und kletten ihn am Selbigen an. Hierbei sollte die gewünschte Position im Ellenbogengelenk von 90° berücksichtigt werden.

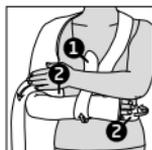

Führen Sie nun Gurt 2 mit dem Ursprung am Handbereich um die Taille bauchseitig der betroffenen Seite des Arms herum und kletten ihn am selbigen an.



Beachten Sie, dass die nicht benötigte Klettfläche an Gurt 2 mit dem mitgeliefertem Flausch-Klett versehen ist, um Beschädigungen an Ihrer Kleidung zu vermeiden.

Ablegen

Zum Ablegen der Schulter-Arm-Bandage geschlossene Form alle Klettverschlüsse öffnen, dann Bandage ablegen.

Materialzusammensetzung

Baumwolle (CO), Pur-Ester (PUR), Polyamid (PA), Elastodien/Latex (LA), Polyester (PES)

Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem eingenähten Textiletikett.



Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

Reinigungshinweise

 Schonwaschgang 30 °C  Nicht bleichen  Nicht im Wäschetrockner trocknen  Nicht bügeln  Nicht chemisch reinigen
Klettverschluss schließen, um die Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. Keinen Weichspüler verwenden. In Form ziehen und an der Luft trocknen.

Gewährleistung

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wurden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw. entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt.

Nutzungsdauer/Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßigem Umgang bestimmt.

Meldepflicht

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Fachhändler oder dem Hersteller sowie dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Die Kontaktdaten des Herstellers entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung. Die Kontaktdaten der zuständigen nationalen Behörde Ihres Landes finden Sie unter folgendem Link: www.bort.com/md-eu-kontakt.


Entsorgung

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Der Hersteller bestätigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES entspricht.

Messpunkt

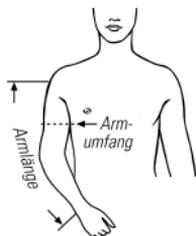

Armumfang
Armlänge

Größen

Größen	Armumfang	Armlänge
Größe 0/S _____	26 – 32 cm	48 – 52 cm
Größe 1/M _____	28 – 34 cm	50 – 56 cm
Größe 2/L _____	32 – 40 cm	54 – 60 cm
Größe 3/XL _____	38 – 48 cm	58 – 68 cm

rechts und links gleich

MD Medizinprodukt |  Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

Stand: 09.2023

Vertrieb durch

Seeger Gesundheitshaus GmbH & Co. KG
Döbelner Straße 1 – 5
12627 Berlin

Hersteller

BORT GmbH
Am Schweizerbach 1
D-71384 Weinstadt

www.seeger-gesundheit.de



PDF: ga.seeger-gesundheit.de

